

▲ 用A4紙張以100%的倍率印出，確保刻度尺量是正確的 ▲

乳頭直徑測量工具

Nipple Diameter Measuring Tool

「準確測量乳頭直徑」是選購合身喇叭罩的關鍵！
這攸關媽媽使用吸乳器的舒適性及是否能有效吸乳

測乳頭尺寸的時機分為「哺乳前」和「哺乳後」，量測需細算至毫釐(mm)

步驟1 使用使用量尺或是下載Maymom提供的乳頭尺卡檔案測量乳頭(不含乳暈)直徑。


步驟2 量測乳頭基底(不含乳暈)直徑：

假如您測量的時機為「哺乳前」，則依照量測結果再+3~5mm為最舒適尺寸


假如您測量的時機為「哺乳後」，則依照量測結果再+1~2mm為最舒適尺寸

(例如：「哺乳後」測量乳頭結果為23mm，您應選擇24~25mm的喇叭罩較為合適。)


測量工具 ① 直尺

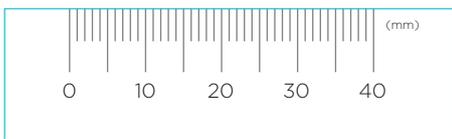

請沿藍線裁剪

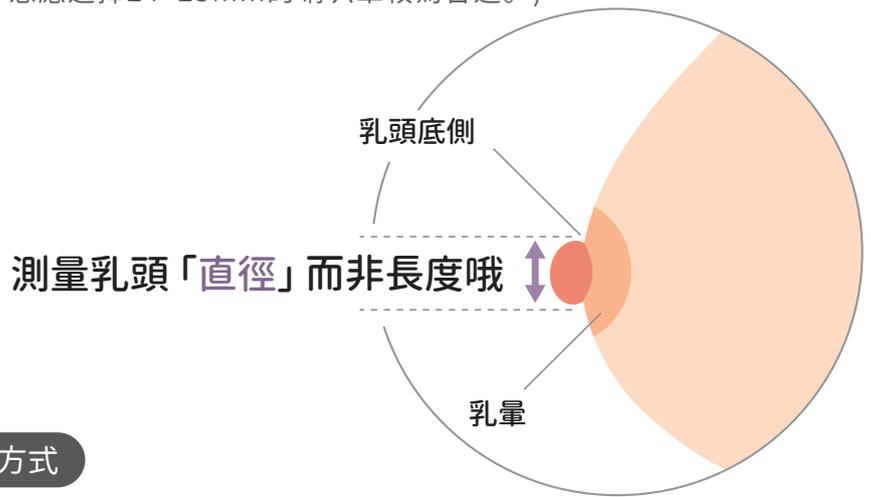


測量工具 ② 游標卡尺 圖解測量方式

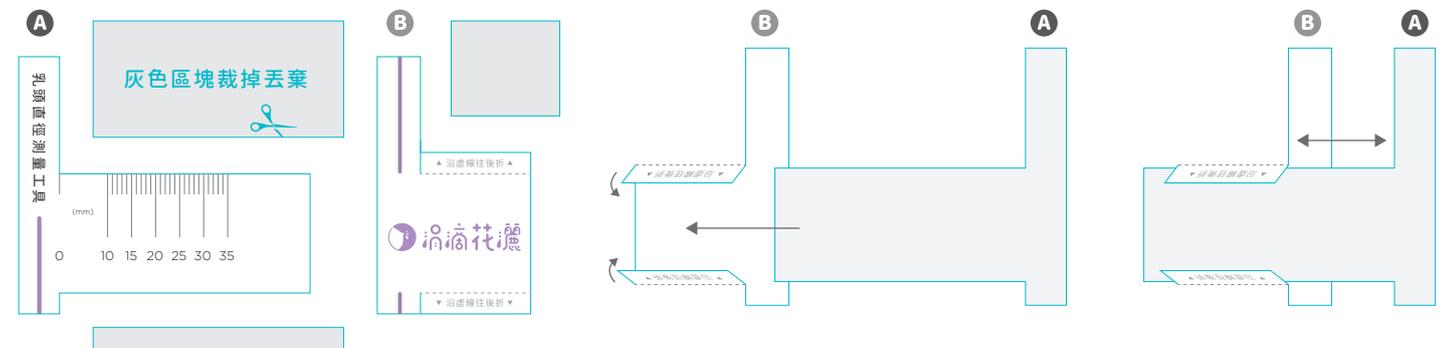


✂ 剪下方測量卡，並依照藍線裁開，得A B。

➡ 翻至背面，B沿虛線往後摺。

➡ 將A套入B，即可左右平行滑動。

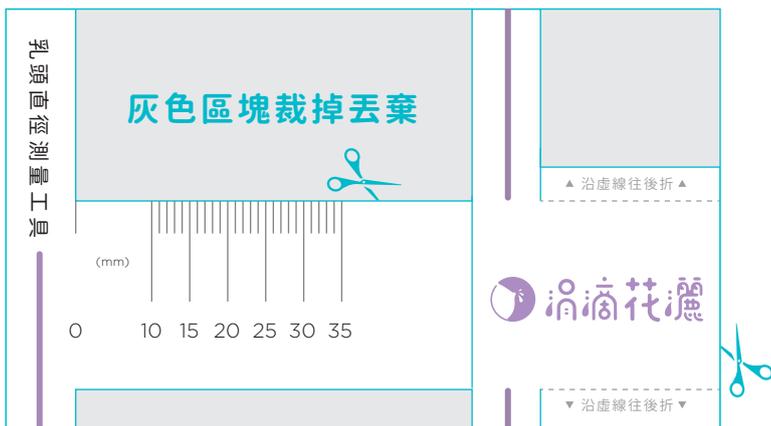

※請沿藍線將測量卡剪裁取下，並依上方說明使用。

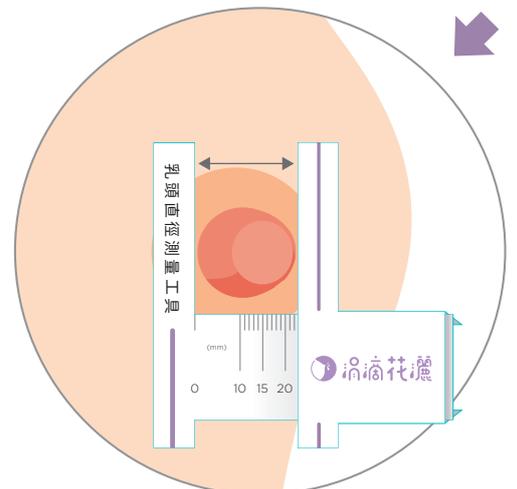

即可丈量乳頭直徑基底(不包含乳暈)。